

**KARTA GWARANCYJNA
CHODZIK CZTEROKOŁOWY RF-610**



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa
www.rehafund.pl

tel. (22) 59 40 300
fax (22) 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

- Firma Reha Fund zapewnia Nabywcę, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz dobrej jakości.
- Sprzęt objęty jest 30-miesięcznym okresem gwarancji.
- Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte bezpłatnie przez producenta, pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
- Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do Punktu Serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
- Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją czyszczeniem i regulacją sprzętu opisane w instrukcji użytkowania
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, szyny sprężyny itp.
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia sprzętu np. urwania, stłuczenia, wygięcia, zarysowania itp.
 - wady powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, dokonywanie samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- Przed oddaniem sprzętu do Punktu Serwisowego należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
- Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, wyłącznie w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
- Sprzęt jest przeznaczony do użytku prywatnego. Nie należy go wykorzystywać w siłowniach i klubach kulturystycznych.
- W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Nabywca będzie obciążony kosztami dojazdu.
- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszka uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

PRZEGLĄD/NAPRAWA (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i Podpis Serwisu
1.					
2.					
3.					

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CHODZIK CZTEROKOŁOWY RF-610**

Nr katalogowy: RF-610
Max. bezpieczne obciążenie: 136 kg
Regulacja wys. uchwytów: 820 mm – 950 mm
Maksymalna szerokość: 505 mm
Waga: 8,66 kg



UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z chodzika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Chodzik przeznaczony jest do pomocy dla osób, które wymagają wsparcia podczas chodzenia, w przypadku zmęczenia, zapewnia także możliwość spoczynku. Może być użytkowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Zawsze przed użyciem chodzika upewnij się, że jest on prawidłowo zablokowany w pozycji rozłożonej.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia chodzika.
- Nie przewozić w torbie elementów mocno wystających poza jej obszar, ponieważ może to wpłynąć na stabilność chodzika.
- Podczas korzystania z chodzika zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie chodzika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
- Korzystanie z chodzika w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać korozję jego ruchomych elementów co w efekcie może spowodować uszkodzenie chodzika.
- Nie korzystać z chodzika podczas chodzenia po schodach.
- Nie przechować chodzika w temperaturze poniżej 0°C

Nieprzebranie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z chodzika, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.

UWAGA!

Poniższa informacja to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.

Jeżeli chodzik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia część ciężaru ciała przejmują chodzik.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE CHODZIKA

Aby rozłożyć:

1. Chwyc przednią ramę chodzika jedną ręką i tylną, ruchomą ramę drugą ręką następnie odciągnij je od siebie.
2. Zablokuj rozłożoną ramę chodzika poprzez pchnięcie do dołu dźwigni blokującej znajdującej się pod siedziskiem. Upewnij się, że do końca zamknąłeś dźwignię blokującą.

Aby złożyć:

1. Pociągnij do góry dźwignię blokującą znajdującą się poniżej siedziska.
2. Włącz hamulce i podnieś chodzik do góry za rączki aż złoży się.

MONTAŻ

1. Chodzik jest dostarczany w pełni wyregulowany i zmontowany z wyjątkiem uchwytów do prowadzenia.
2. Dopasuj rączki do pionowych rurek ramy chodzika:
 - Włóż rurkę rączki do otworu (odpowiadającego jej wielkością) w pionowej rurce ramy chodzika.
 - Umieść rączkę na żądanej wysokości i zaciśnij obejmę blokującą po przez dokręcenie śruby.
 - Sprawdź czy rączka jest prawidłowo zabezpieczona.

Powtórz czynność z drugą rączką.

HAMULCE

UWAGA!

Przed korzystaniem z chodzika sprawdź czy hamulce działają prawidłowo i czy są dobrze wyregulowane.

- Podczas ruchu hamulce można włączyć poprzez dociśnięcie uchwytu hamulca do rączki chodzika. Każdy hamulec włącza się niezależnie.
- Każdy z hamulców można zablokować - aby to uczynić należy pehnać uchwyt hamulca do dołu. Aby zwolnić zablokowany hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry.
- Do regulacji hamulców służą dwa regulatory po obu stronach. Jeden regulator znajduje się od przodu uchwytu hamulca, a drugi w miejscu gdzie przewód hamulca wchodzi do rurki chodzika. Aby wyregulować hamulce, poluzuj nakrętkę blokującą. Obracając regulator przeciwnie do ruchu wskazówek zegara sprawisz że klocek hamulcowy dociśnie się powodując szybsze i mocniejsze hamowanie. Jeżeli chcesz zmniejszyć siłę hamowania przekręć odpowiednio regulator zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po zakończeniu regulacji dokręć z powrotem nakrętkę blokującą.

TORBA

- Torba jest zamontowana na rurce pod siedziskiem chodzika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zaleca się regularną kontrolę chodzika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania
 - obejmę blokującą prawidłowo zabezpieczają ustawioną wysokość rączek
 - przewody hamulców nie są postrzępione
 - hamulce są prawidłowo wyregulowane
 - żadne inne części chodzika nie są poluzowane lub uszkodzone.

Jeśli zachodzi taka konieczność należy wymienić lub wyregulować odpowiednie części.

- Zaleca się regularne czyszczenie chodzika miękką szmatką i wodą z mydłem. Chodzik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.

UWAGA!

Do czyszczenia chodzika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.

PRODUCENT:

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03 – 310 Warszawa, POLAND
tel.: +48 22 594 03 00
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl